



Σας παρουσιάζουμε το Silhouette Soft®

Το νήμα ανόρθωσης που σας βοηθά να τονώσετε
την αυτοπεποίθηση των ασθενών σας.

Τα μοντέλα δεν είναι πραγματικές ασθενείς.

 SILHOUETTE SOFT®

Τι είναι το Silhouette Soft;

Το Silhouette Soft είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό νήμα ανόρθωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανατοποθέτηση του δερματικού ιστού στο μέσο τριτημόριο του προσώπου, τη γραμμή της γνάθου, τα φρύδια και τον αυχένα. Ανορθώνει το χαλαρό δέρμα, ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να εξαφανίζουν τα ορατά σημάδια της γήρανσης.

Τα απορροφήσιμα νήματα PLLA – με πατενταρισμένη τεχνολογία κώνων διπλής κατεύθυνσης – σας δίνουν τη δυνατότητα να διορθώνετε και να ανορθώνετε τους ιστούς, αποκαθιστώντας το πρόσωπο και δίνοντάς του ένα πιο νεανικό σχήμα.

Εκτός από την άμεση ανόρθωση και την ενίσχυση των περιγραμμάτων, το Silhouette Soft παρέχει σταδιακή και διαρκή αναγέννηση των ιστών, διεγείροντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου του οργανισμού, για πιο μακροχρόνια αποτελέσματα. Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα αναζωογονείται από μέσα και γίνεται πιο νεανικό.


Ασφαλές,¹ ελάχιστα επεμβατικό και με εξαιρετικά αποτελέσματα, το Silhouette Soft είναι η θεραπεία που θα βοηθήσει τις ασθενείς σας να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Επιλέξτε την ευκολία και την αυτοπεποίθηση

Ιδανικό για άτομα με πολυάσχολο καθημερινό πρόγραμμα, το Silhouette Soft είναι μια διαδικασία που μπορείτε να εκτελέσετε σε λιγότερο από μία ώρα χρησιμοποιώντας μόνο τοπική αναισθησία. Ο χρόνος αποθεραπείας είναι ελάχιστος και οι περισσότεροι ασθενείς επανέρχονται στις καθημερινές τους δραστηριότητες την επόμενη μέρα.¹

Αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι το Silhouette Soft είναι μια θεραπεία μακράς διάρκειας, με αποτελέσματα που διαρκούν έως και 24 μήνες.² Επιπλέον, το ιστορικό ασφάλειας της θεραπείας είναι εξαιρετικό, με πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300.000 θεραπείες σε περισσότερες από 70 χώρες.³ Οι ασθενείς λατρεύουν τη θεραπεία, επειδή προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστο πόνο και ταλαιπωρία.

Έλλειψη καθορισμένων
περιγραμμάτων και
αποκατάσταση όγκου

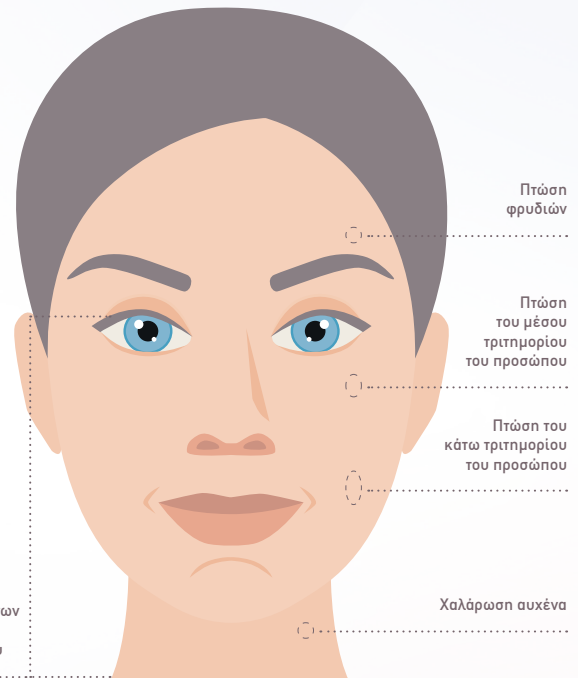

Το Silhouette Soft διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη ώστε να έχετε την ελευθερία και την ευελιξία να το εφαρμόσετε σε διάφορες περιοχές και να αντιμετωπίσετε διαφορετικές περιπτώσεις χαλάρωσης.


Σας παρουσιάζουμε το νέο short νήμα 12 κώνων

Περισσότεροι κώνοι ανά εκατοστό, καλύτερος έλεγχος, πιο όμορφα αποτελέσματα.


Το νέο short νήμα 12 κώνων παρέχει τις ιδανικές διαστάσεις και ένταση για τη θεραπεία των ρυτίδων θλίψης στον κρόταφο – μία από τις πιο δύσκολες περιοχές θεραπείας. Χάρη στην υψηλότερη συγκέντρωση κώνων, η δύναμη αναστολής κατανέμεται σε περισσότερα σημεία εμπλοκής, μειώνοντας τη δύναμη που εφαρμόζεται ανά σημείο.

Το προϊόν αναπτύχθηκε μετά από σχόλια που συγκεντρώσαμε από κλινικούς ιατρούς και είναι πλέον στη διάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση silhouette-soft.com


Μην ξεχνάτε ότι ο σημαντικός παράγοντας είναι το ενεργό μήκος της συσκευής. Θα πρέπει πάντοτε να επιλέγετε το νήμα με το καταλληλότερο μήκος σε σχέση με την προβλεπόμενη περιοχή θεραπείας. Τα νέα πρωτόκολλα εφαρμογής παρέχουν πλήρως ενημερωμένες οδηγίες για κάθε περιοχή του προσώπου, λαμβάνοντας υπόψη τη χαλάρωση του δέρματος του ασθενούς.

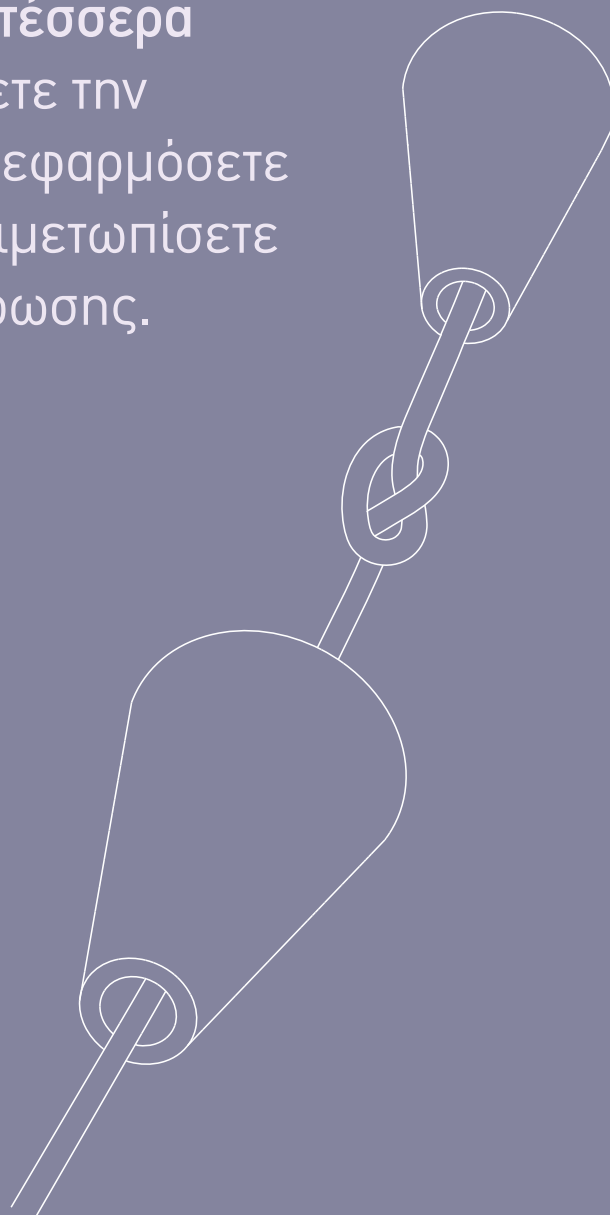


8 ΚΩΝΩΝ

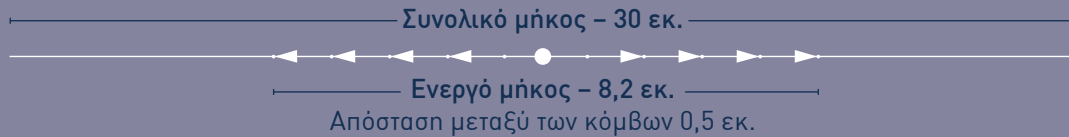


12 ΚΩΝΩΝ

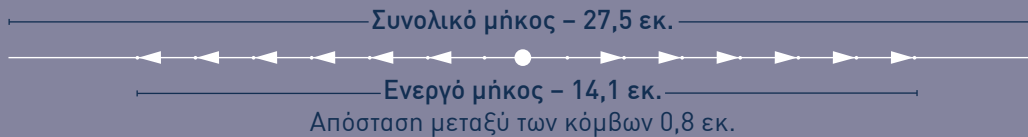

NEO SHORT 12-ΚΩΝΩΝ

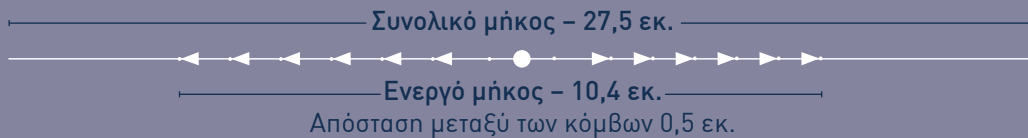

16 ΚΩΝΩΝ

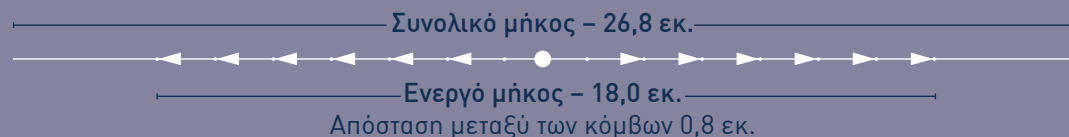

Τρόπος χρήσης του Silhouette Soft

Η ολοκληρωμένη σειρά του Silhouette Soft υποστηρίζεται από αναλυτικά πρωτόκολλα εφαρμογής, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από κορυφαίους ειδικούς για τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για όλα τα επίπεδα χαλάρωσης.

Η διαδικασία επεξεργασίας είναι εξορθολογισμένη και αποτελεσματική ώστε να αξιοποιείτε στο έπακρο τους πόρους της Silhouette Soft που παρέχουμε – σε μόλις πέντε σαφή βήματα για την επίτευξη όμορφου αποτελέσματος.

Αν θέλετε να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία μας και τις αναλυτικές τεχνικές οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το Silhouette Soft για να ενισχύσετε την εμφάνιση και να τονώσετε την αυτοπεποίθηση των ασθενών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Βήμα 1: Αξιολογήστε το δέρμα των ασθενών σας χρησιμοποιώντας την κλίμακα Silhouette Soft Laxity Scale.

Βήμα 2: Αξιολογήστε την κατάσταση του δέρματός τους για να προσδιορίσετε κατά πόσο η χαλάρωση είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή.

Βήμα 3: Προσδιορίστε τα συνιστώμενα πρωτόκολλα εφαρμογής.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε έναν από τους χάρακες Silhouette Soft (για ήπια ή μέτρια χαλάρωση) για να προβείτε στη μέτρηση πριν από τη διαδικασία.

Βήμα 5: Ακολουθήστε τα νέα, ανεπτυγμένα από ειδικούς πρωτόκολλα εφαρμογής και τις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού.



Το μοντέλο δεν είναι πραγματικό ασθενής.

Αναβαθμίστε τις προσφερόμενες υπηρεσίες σας

Το Silhouette Soft είναι ένα κορυφαίο πατενταρισμένο προϊόν νήματος ανόρθωσης, το οποίο διατίθεται από τη Sinclair σε προσεκτικά επιλεγμένους επαγγελματίες υγείας. Επομένως, η συνεργασία μαζί μας σας προσδίδει όχι μόνο κύρος, αλλά και πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες και παροχές.

Συνδυάζεται άριστα με άλλες διαδικασίες, όπως μεταξύ άλλων θεραπείες με υλικά πλήρωσης, εγχύσεις αλλαντικής νευροτοξίνης και σχέδια θεραπείας EBD⁴ – και έτσι σας βοηθά στην ανάπτυξη του ιατρείου σας.

Παροχή υποστήριξης σε εσάς και την επιχείρησή σας

Εκτός από το ασφαλές¹ και αποτελεσματικό νήμα ανόρθωσης, το Silhouette Soft προσφέρει και άλλα οφέλη για την ανάπτυξη του ιατρείου σας. Η Sinclair προσφέρει εκπαίδευση και διαρκή υποστήριξη, ώστε να μπορείτε να προσφέρετε στους ασθενείς απaráμιλλα αποτελέσματα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Αυτό που επιθυμούμε είναι να επενδύσουμε τόσο στην ατομική σας επιτυχία ως ιατρού όσο και στην επιτυχία του ιατρείου σας. Γιατί βοηθώντας σας να αναπτυχθείτε, αναπτυσσόμαστε και ευδοκимуόμε και εμείς οι ίδιοι.

Πηγές

1. Δεδομένα αρχείου.
2. Στις Οδηγίες Χρήσης μπορείτε να βρείτε πλήρη κατάλογο των συστάσεων μετά τη θεραπεία.
3. Στοιχεία Οκτωβρίου 2021.
4. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την παρουσίαση έχουν παρασχεθεί από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου μέσω της εμπειρίας στο ιατρείο τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμμετοχή της Sinclair. Οποιοσδήποτε γνώμες, πληροφορίες, απόψεις ή συμβουλές παρέχονται ή εκφράζονται σε αυτό το έντυπο προέρχονται από τους εν λόγω επαγγελματίες ιατρούς και όχι από τη Sinclair. Η χρήση των προϊόντων της Sinclair σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή εξάρτημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Χρήσης πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με ευθύνη των επαγγελματιών ιατρών. Αφήστε επαρκή χρόνο για την επούλωση μεταξύ των θεραπειών για συνδυαστική χρήση.

Τα **Silhouette Soft**[®] είναι απορροφήσιμα, αποστειρωμένα, εμφυτεύσιμα νήματα μίας χρήσης που προορίζονται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για την ανακατασκευή του προσώπου και του λαιμού, με στόχο τη θεραπεία της μορφολογικής ασυμμετρίας του προσώπου και της βλεφαρόπτωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:

- Των αποτελεσμάτων της πτώσης ή παράλυσης του προσώπου (π.χ. παράλυση του Bell, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ιατρογενής βλάβη, παράλυση του προσώπου που σχετίζεται με τον ιδίο έρπητα ζωστήρα-ανεμοβλογιάς, τραύμα και συγγενής παράλυση).
- Μορφολογική ασυμμετρία (π.χ. συγγενείς ανωμαλίες, τραύμα στο πρόσωπο ή στην κροταφογναθική άρθρωση).

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Όπως σε όλες οι διαδικασίες αυτού του τύπου, υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, αν και αυτό δεν είναι κάτι που εμφανίζεται σε όλους/ες τους/τις ασθενείς. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες μπορεί να είναι λοίμωξη, ελάχιστη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση του ιστού, πόνος (ο οποίος μπορεί να είναι παροδικός ή επίμονος), πρήξιμο και οίδημα, παροδικό αιμάτωμα ή μώλωπες και παροδική ρυτίδωση ή σχηματισμός πτυχώσεων. Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι εκχύμωση, τραυματισμός του αισθητήριου/κινητικού νεύρου, ασυμμετρία, νέκρωση, μετατοπίσεις των νημάτων και δυνατότητα ψηλάφησης των άκρων/των κώνων των νημάτων. Μετά από χειρουργική επέμβαση σε ορισμένους ασθενείς ενδέχεται να εμφανιστούν ευαισθησία στο υλικό/αλλεργικές αντιδράσεις. Η εμφάνιση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας πρέπει να αναφέρεται αμέσως. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@dermaceuticals.gr ή στείλτε τα στοιχεία απευθείας στη Sinclair στη διεύθυνση quality@sinclairpharma.com.






1st Floor Whitfield Court, 30-32 Whitfield St, London, W1T 2RQ, United Kingdom.
E. silhouette-soft@sinclair.com www.silhouette-soft.com

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος



ADVANCED SKIN
REGENERATIVE PRODUCTS

Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 4
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15341
ΤΗΛ.: 210 7214450
www.dermaceuticals.gr

Ακολουθήστε μας:   

Your longtime trusted partner
The pioneer in Modern Aesthetic
Medicine

UKBR-00661518-001-000



Κατασκευάζεται από την: Sinclair
Pharma US © 2021 18 Technology Drive
Unit 134, Irvine, CA 92618, Η.Π.Α.